



CONFORMITÀ CHE PERMETTE LA DISINFEZIONE AMBIENTALE

Incidin™ OxyFoam S

DETERGENTE E DISINFETTANTE SPORICIDA PRONTO ALL'USO CON HI-SPEED H₂O₂™

La formulazione avanzata di Incidin™ OxyFoam S fornisce i benefici di una soluzione brevettata* di perossido di idrogeno con un'efficacia ad ampio spettro.

Sono efficaci contro una vasta gamma di agenti patogeni e non lasciano residui attivi grazie al loro rapido tasso di evaporazione.

Incidin™ OxyFoam S fornisce:

- Hi-speed H₂O₂™
- Principio attivo che si decompone in acqua e ossigeno
- Efficacia sporicida e virucida
- Eccellente compatibilità con i materiali

*Brevetto europeo EP1987121



DM Classe IIb

CND: D0599 - Ossigenoproduttori - Altri

ECOLAB®

www.ecolab.com

Incidin™ OxyFoam S

Detergente e disinfettante sporicida pronto all'uso con H₂O₂™ ad alta velocità

EFFICACE

- Efficacia ad ampio spettro
- Tempi di contatto brevi

SICURO

- Il principio attivo si decompone in acqua e ossigeno
- Eccellente compatibilità con i materiali

CONVENIENTE

- Pulisce e disinfetta in un solo passaggio
- Formati pronti all'uso

ISTRUZIONI PER L'USO



Superficie bagnata



Pulire la superficie assicurandosi che sia completamente bagnata



Lasciare asciugare



Applicare su un panno pulito



Strofinare la superficie assicurandosi che sia completamente bagnata



Lasciare asciugare

PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

EFFICACIA NON DILUITA	TEMPO DI CONTATTO
Disinfezione di superfici secondo il metodo VAH 2015 (incl. EN 16615), in condizioni di sporco	
Battericida, lieviticida	5 min
Fungicida	5 min
Micobattericida	15 min
Fase 2/Step 2 - 4 field-test	
EN 16615 (battericida)	1 min**
EN 16615 (lieviticida)	1 min**
Metodo EN 16615 (fungicida)	5 min**
Metodo EN 16615 (tubercolicida, micobattericida)	5 min**
Metodo EN 16615 acc. CEN TC216 prWI Oct 2020 / metodo VAH 19 (C.difficile)	15 min*
Fase 2/Step 1 - test di sospensione	
EN 13727 (battericida)	1 min
EN 13624 (lieviticida)	1 min
EN 13624 (fungicida)	5 min
EN 14348 (tubercolicida, micobattericida)	5 min
EN 14476 (efficacia contro i virus incapsulati)	30 sec
EN 14476 (virucida a spettro limitato)	1 min* / 15 min**
EN 14476 Adeno	30 sec
EN 14476 Noro	1 min* / 15 min**
EN 14476 virucida	2 min* / 30 min**
EN 17126 (sporicida)	60 min*
EN 17126 (C. difficile)	30min*/60 min**
Testato in acc. a DVV 2015	
Efficace contro i virus incapsulati secondo la raccomandazione RKI 01/2004	15 sec
Virucida a spettro limitato & Norovirus (MNV)	30 min
Adeno	30 sec
Polyoma SV40	30 sec
Rota	15 sec

* in condizioni di pulito ** in condizioni di sporco

INFORMAZIONI DI ORDINE E CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
Incidin™ OxyFoam S	6 x 750ml	3104630

AREA DI APPLICAZIONE



Liquido per la pulizia e la disinfezione delle superfici pronto all'uso ad azione rapida e sporicida.

- secondo Direttiva 93 / 42 / CEE: per dispositivi medici

ISTRUZIONI PER L'USO

Incidin™ OxyFoam S: Bagnare la superficie assicurandosi che la superficie sia completamente bagnata. Strofinare la superficie con un panno pulito e lasciare asciugare.

In alternativa, applicare il prodotto su un panno pulito, strofinare la superficie e lasciare asciugare. Non risciacquare.

L'uso di un prodotto di pulizia e disinfezione non sostituisce la pulizia regolare.

Non utilizzare su superfici sensibili agli agenti ossidanti come il marmo, il rame o ottone. Per il riprocessamento di dispositivi medici osservare sempre le istruzioni d'uso del produttore, compresa la compatibilità. Disinfezione terminale di dispositivi medici semi-critici (es. sonde e sonde TEE): Se l'immersione non è possibile, disinfettare il dispositivo con un panno come descritto sopra. Risciacquare accuratamente con acqua di qualità potabile in questo caso dopo che è trascorso il tempo di contatto.

INGREDIENTI

100g contengono il seguente attivo: 1,5 g di perossido di idrogeno.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale tra i 5°C e i 25°C in un luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.

Durata di conservazione dopo la prima apertura: Fine della data di scadenza.

USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.

ECOLAB SRL
Via Trento, 26
20871 Vimercate
(MB) - Italia



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.com